

GENERADOR DE OXÍGENO ilimitado O_2



HASTA
96%
NIVEL DE PUREZA



24
horas



10Lt
/ minuto

¡Reemplaza al
balón de oxígeno
convencional!

BENEFICIOS



1. Ahorro en la inversión

El equipo tiene un vida útil promedio de 4 años, equivale a 1500 balones de oxígeno de 10m3.



2. Desplazamiento Fácil

Peso 18kg con 04 ruedas para un transporte fácil y rápido dentro de la casa u hospital.



3. Mantenimiento Básico

NO requiere mantenimiento interno, salvo el lavado del primer filtro o cambio del filtro HEPA.



4. Nebulización

El equipo también sirve para nebulizar, a partir de 5 litros x minuto

Instrucciones de Uso

1. Llenar con agua destilada el vaso humidificador



Llenar hasta el tope de la línea MAX, no permitir que baje del MIN y conectar las líneas de entrada al Humidificador y salida del Oxígeno.

2. Conectar el equipo a la corriente eléctrica



Conectar el enchufe, encender el "Switch" en la parte posterior y presionar modo ON/OFF. Ojo: Verificar que el caudal esté en 0 litros x minuto

3. Ajustar Caudal de Oxígeno



Regular el caudal de oxígeno con el Flujómetro según la necesidad de la terapia. Ojo: toma unos 5 minutos llegar a la potencia solicitada.

4. Temporizador



Presionar (+) (-), cada pulsación aumenta o disminuye el "timing" 10 min al inicial, con apagado automático.

5. Alarma de Concentración de Oxígeno

- Luz Verde: $\geq 82\%$
- Luz Amarilla: $72\% - 82\%$
- Luz Roja: $> 65\%$



- 📍 Calle Guadalupe Victoria N° 100 – La Esperanza
- 📍 Calle Diego de Almagro N° 200 – Centro Trujillo
- 📍 Calle Micaela Bastidas N° 1289 – El Porvenir

**DESPACHO A
LIMA Y PROVINCIAS**
ENTREGA INMEDIATA